

Comment utiliser le dispositif d'insertion Accu-Chek® LinkAssist

Le dispositif d'insertion Accu-Chek LinkAssist sert à insérer les sets d'infusion Accu-Chek® FlexLink. Il permet de réussir l'insertion plus facilement et de façon quasiment indolore à des sites difficiles d'accès.



- A Bouton de déclenchement
- B Cran de sécurité
- C Tenseur
- D Chambre de chargement
- E Base



1 Avant de déballer votre set d'infusion, lavez-vous les mains. Ensuite, enfoncez le tenseur de l'Accu-Chek LinkAssist dans sa base.



2 Saisissez le set d'infusion par son étui de protection. Orientez le capuchon de maintien bleu vers le haut et enfoncez-le dans la chambre de chargement du dispositif d'insertion jusqu'à la butée.



3 Otez avec précaution l'étui de protection transparent du set d'infusion en retirant tout en imprimant un mouvement de rotation.



4 Retirez les deux parties du film protecteur de l'adhésif.




5 Tenez fermement la base de l'Accu-Chek LinkAssist d'une main et de l'autre main, tirez le tenseur au maximum vers le haut.




6 Déverrouillez le cran de sécurité.



7 Appliquez le dispositif d'insertion Accu-Chek LinkAssist sur le site préalablement préparé et appuyez sur le bouton de déclenchement pour insérer la canule dans la peau.

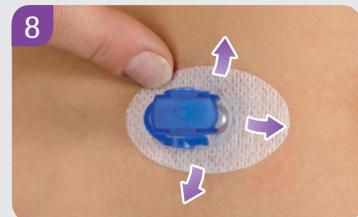


8 Appliquez l'adhésif sur la peau en passant le doigt sur son pourtour.

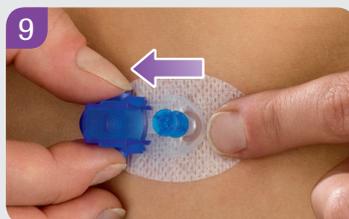

9 Tout en maintenant l'adhésif en place, pressez doucement les clips latéraux du capuchon de maintien bleu et enlevez-le du corps de la canule.



10 Maintenez fermement le corps de la canule en place au niveau du site d'insertion, puis retirez l'aiguille-guide en la saisissant par la tête.

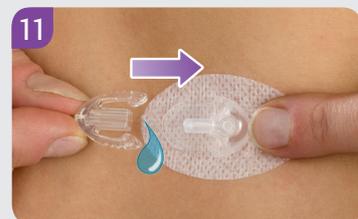

11 La tubulure purgée doit être connectée sur le corps de la canule. Un "clic" audible confirme la bonne connexion des 2 parties du set d'infusion. Avant de reprendre votre thérapie par pompe, purgez le volume mort de la canule avec un bolus de 1.0 unité d'insuline.

Pour des instructions détaillées et pour des informations de sécurité importantes, consultez les notices d'utilisation qui accompagnent ce produit et les sets d'infusion.

Découvrez un monde de possibilités.

Pour en savoir plus sur les produits Accu-Chek® et la façon dont ils interagissent afin de bénéficier d'un traitement optimal du diabète, surfez sur www.accu-chek.be ou appelez l'Accu-Chek® Service au numéro gratuit 0800 93 626.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK et ACCU-CHEK LINKASSIST sont des marques déposées du groupe Roche © 2013 Roche Diagnostics.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

