

## Insérer une nouvelle cassette-test


Après avoir effectué les 50 tests




1 Faites glisser le capot de protection jusqu'à la butée.



2 Faites glisser le cran de sécurité vers le haut pour que le couvercle du compartiment de la cassette s'ouvre.

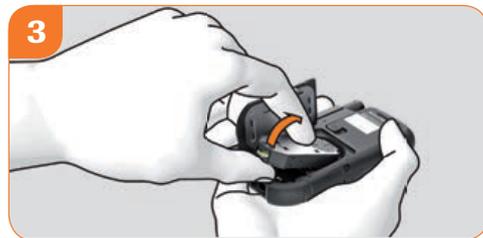

3 Retirez la cassette-test usagée de l'appareil.

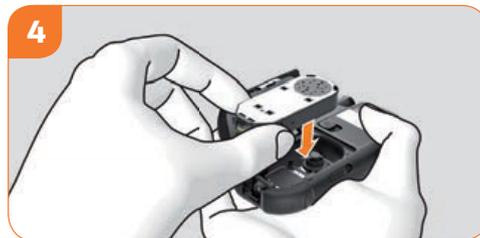

4 Insérez la nouvelle cassette-test dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette et le capot de protection.

## Insérer une nouvelle cartouche de lancettes

Après avoir utilisé les six lancettes



1 Retirez l'embout de l'autopiqueur et la cartouche de lancettes usagée.



2 Insérez la nouvelle cartouche de lancettes dans l'autopiqueur en introduisant d'abord la partie blanche puis replacez l'embout.



3 Tournez l'embout jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée se trouve en face de la marque. Essayez tout d'abord une profondeur moyenne de piqûre, la position 3 par exemple.



4 Changez de lancette en faisant glisser le levier jusqu'à la butée (direction ①), puis replacez-le à sa position initiale (direction ②).

# Sans bandelette, simple, intelligent.



Quatre étapes simples pour mesurer votre glycémie.


## Quatre étapes simples pour mesurer sa glycémie



Ouvrez le capot. L'appareil s'allume.



Piquez-vous le doigt pour obtenir une goutte de sang.

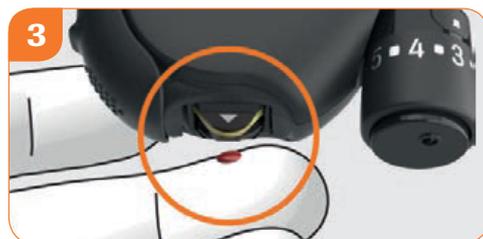

Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive.




Lisez le résultat et refermez le capot. L'appareil s'éteint.

## Quatre points importants pour une mesure fiable



Commencez par vous **laver les mains** à l'eau tiède et au savon. Rincez bien et séchez-vous soigneusement les mains à l'aide d'une serviette propre.

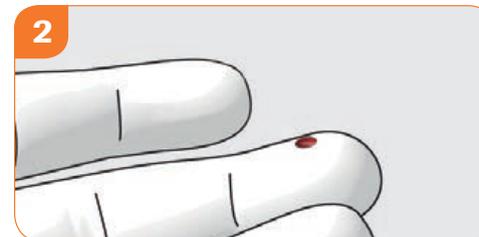

Veillez à obtenir une **goutte de sang bien formée**. La goutte ne doit pas s'étaler.



**Appliquez doucement la goutte de sang** au centre de la zone réactive. **Ne pressez pas la zone réactive contre votre doigt.**



**Appliquez la goutte de sang immédiatement** après l'avoir obtenue. Retirez votre doigt dès que l'écran affiche « Mesure en cours » et qu'un bip retentit (si activé).

Pour garantir une mesure et des décisions thérapeutiques fiables, il convient d'utiliser correctement l'appareil. Veuillez donc suivre attentivement ces instructions.

## Une équipe de spécialistes est là pour vous aider!



Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information sur les produits et services d'Accu-Chek®.

- Utilisation
- Informations générales
- Réponses à vos questions

Vous pouvez nous joindre gratuitement au 0800 93 626, du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00. Simple et rapide! Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Visitez [www.youtube.com/AccuCheckBelgium](http://www.youtube.com/AccuCheckBelgium) pour regarder les dernières vidéos de démonstration Accu-Chek Mobile.

Découvrez un monde de possibilités.



[www.accu-chek.be](http://www.accu-chek.be)



[www.facebook.com/accuchekbe](http://www.facebook.com/accuchekbe)



0800 93 626



[www.youtube.com/AccuCheckBelgium](http://www.youtube.com/AccuCheckBelgium)

ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE, CLIXMOTION et FASTCLIX sont des marques de Roche.  
© 2015 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics Belgium NV/SA  
Schaarbeeklei 198  
1800 VILVOORDE

ACCUCHEK®